

Biogel® Tech käsineet

Biogel® Tech käsineet on suunniteltu käytettäväksi kriittisessä ympäristössä. Kaksinkertainen ja kuumasaumattu pakkaus noudattaa hygieniaprotokollaa ja varmistaa yksinkertaisen käytön.

Kuinka purkaa Biogel Tech käsinepakkaus varmistaen steriilin käyttöönoton

1



Käytä muoviesiliinaa suojaamaan vaatteesi lialta pahvilaatikossa. Tämä lika voi muuten kulkeutua sisällä olevien muovipussien joukkoon laatikkoa avattaessa ja pakkauksesta purettaessa.

3



Ulomman muovipussin poistamiseen suosittelemme saksien käyttöä. Aloita reunoista kontaminaatorikin minimoimiseksi. Muista sitten taittaa muovi ulospäin koskematta sisäpuoliseen muovipussiin.

4




Desinfioidu kätesi ennen kuin asetat 25 paria (vielä muovipussissa) toiselle puhtaalle desinfioidulle pinnalle.

2



Ennen kuin purat muovipussit, varmista, että kätesi on desinfioitu. Varo koskettamasta muovipusseja likaisilla käsillä.

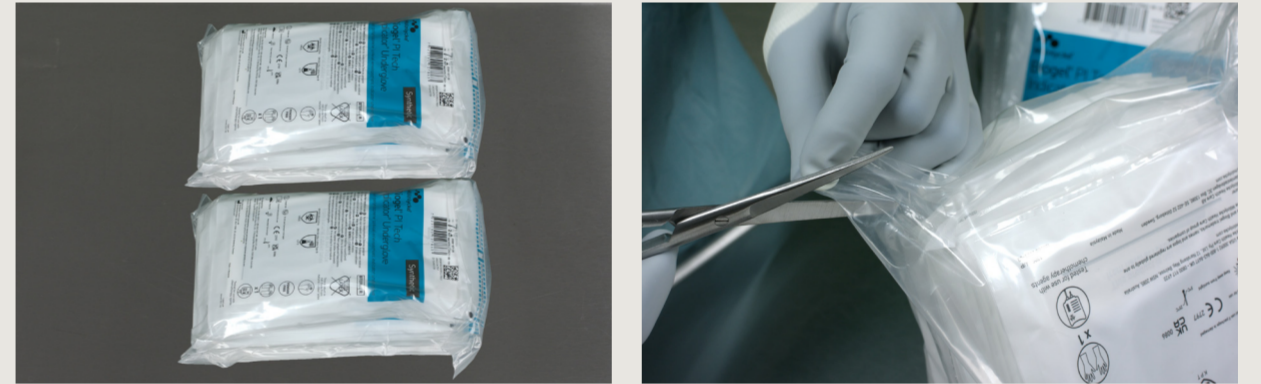

Käsineet voidaan säilyttää sisäisessä muovipussissa tai purkaa ja laittaa säilytyslaatikkoon. Pue asianmukaiset suojavaatteet ja steriilit käsineet ennen kuin purat steriilit suojat sisäisestä muovipussista. Jälleen saksista on hyötyä muovipussin pohjan leikkaamisessa, jotta säilytyslaatikko on helppo täyttää.



Aseta pussit puhtaalle ja desinfioidulle pinnalle.



Käsineet voidaan nyt säilyttää lähempänä käyttöpaikkaa.

*160 paria kokoa 9.

Biogel Tech valikoima – Avaa seuraavan tason turvallisuus

Jokainen Biogel Tech -käsinepari on kääritty korkealaatuiseen polyeteenistä valmistettuun sisäkääreeseen hiukkasten määrän pitämiseksi minimissä. Kääre on rakennettu niin, että se pysyy auki taitettuna, mikä varmistaa käsineiden aseptisen pukemisen. Sitten pari pakataan steriiliin suojakalvoon, joka on valmistettu laminaattipolyesteristä ja matalatiheyksistä polyeteenistä.

Lue lisää www.molnlycke.fi

Mölnlycke Health Care Oy, Valimotie 21, 00380 Helsinki Suomi. Puhelin: 0201 622 300 Mölnlycke ja Biogel -tavaramerkit, -nimet ja -logot ovat maailmanlaajuisesti yhden tai useamman Mölnlycke Health Care -yhtiön rekisteröityä omaisuutta. © 2022 Mölnlycke Health Care AB. Kaikki oikeudet pidätetään. FISU2152301



Biogel® Tech

Tarkkuutta joka kosketuksella


Mölnlycke®