



Mefix®

Fixation adhésive


Mefix® est la fixation idéale pour les pansements, compresses, cathéters et sondes. Il garantit une fixation efficace et douce grâce à son adhésif à haute tolérance cutanée.

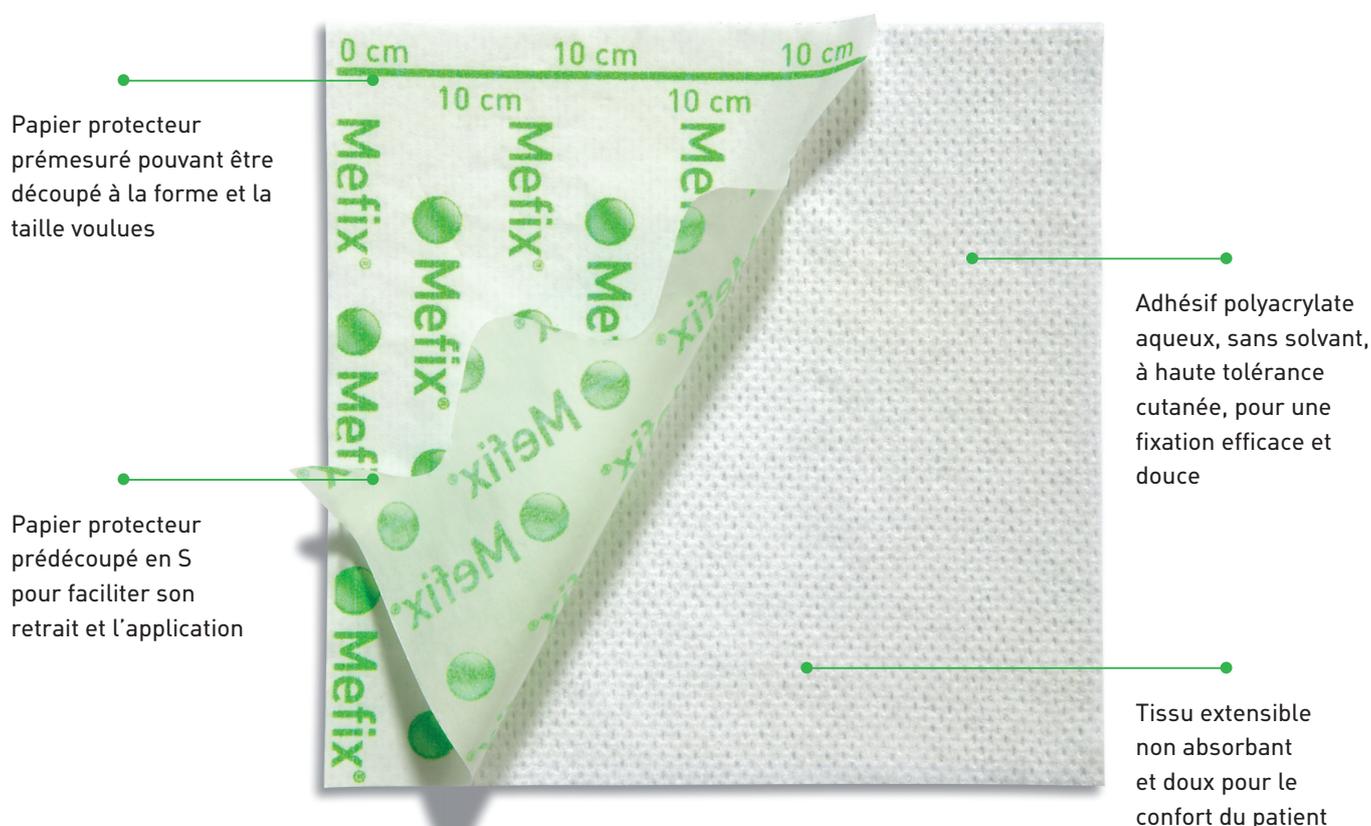

Mode d'emploi – fixation à l'aide du bord ondulé

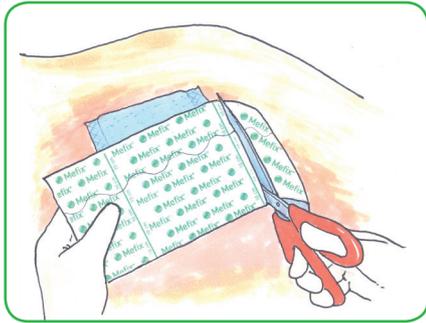

Coupez à la dimension souhaitée.

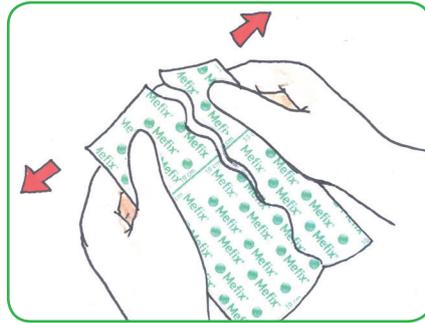

Séparez les deux parties du papier protecteur en pliant et en tirant légèrement. Enlevez la bande étroite.



Appliquez sur la peau la partie dont l'adhésif est exposé. Enlevez l'autre bout du papier protecteur. Ne tirez pas sur Mefix® lors de son application et lissez le bien pour une adhérence parfaite..

Mode d'action de Mefix®

La structure poreuse du tissu non tissé garantit la perméabilité à l'air et la vapeur. Le tissu est extensible, s'adapte bien aux contours du corps et permet au patient de bouger. Le tissu est non-absorbant et fait office de barrière contre l'écoulement du sang et des liquides.

L'adhésif polyacrylate aqueux a été conçu pour respecter la peau, tout en garantissant une fixation efficace.

Pour faciliter le découpage du pansement, le papier protecteur est pourvu d'une indication tous les 10 cm. Grâce à la prédécoupe (pour les tailles > 2,5 cm) le papier protecteur est facile à retirer et à appliquer.

Avantages de Mefix®

- Adhésif aqueux, sans solvant, qui respecte la peau
- Papier protecteur pré mesuré pouvant être aisément adapté à la forme et la taille voulues
- S'adapte bien aux contours du corps
- Tissu perméable à l'air qui empêche la macération et accroît le confort du patient
- Peut être stérilisé à la vapeur et à l'EtO



Domaines d'utilisation

Mefix® peut être utilisé dans des situations très variées exigeant une fixation, comme par exemple pour la fixation des pansements, compresses, cathéters et sondes.

Précautions

Il convient de veiller à ce que Mefix® soit appliqué dans la position anatomique, sans exercer de tension sur la peau afin d'éviter tout cisaillement. Cet aspect revêt une grande importance en cas d'application au niveau des articulations.

Gamme Mefix® (non-stérile)

Dimensions	Code CNK	N° d'art.	Conditionnement	Emb.de transport (largeur)
------------	----------	-----------	-----------------	----------------------------

Rouleau 10 mètres

2,5 cm	0839-951	310250	1 pièce	39 pièces
5 cm	0839-969	310500	1 pièce	20 pièces
10 cm	0183-137	311000	1 pièce	20 pièces
20 cm	0890-491	312000	1 pièce	10 pièces
30 cm	0137-729	313000	1 pièce	10 pièces

Rouleau 2,5 mètres

5 cm	0614-966	310570	1 pièce	36 pièces
10 cm	0614-974	311070	1 pièce	18 pièces
15 cm	0614-982	311570	1 pièce	12 pièces